

附件二
版次：1.5

表單編號:SPOCT04-02

Helena Actalyke® XL 凝血時間測定儀品管紀錄表 (分析儀)

儀器編號：

Level I:100 秒

Level II:300 秒

Level III:500 秒

年 月

日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
上槽	Leve I	110																															
		100																															
		90																															
	Leve I II	310																															
		300																															
		290																															
	Leve I III	510																															
		500																															
		490																															
	I : 100秒																																
	II : 300秒																																
	III : 500秒																																
下槽	Leve I	110																															
		100																															
		90																															
	Leve I II	310																															
		300																															
		290																															
	Leve I III	510																															
		500																															
		490																															
	I : 100秒																																
	II : 300秒																																
	III : 500秒																																
簽名																																	

單位主管：

經辦：

Helena Actalyke 凝血時間測定儀品管不符合事項處理表

表單編號：

單位：	發現人員：	發現時間：_____年____月____日
檢驗項目： <u>Activated Clotting Time</u> 機台或試劑： <u>Helena Actalyke</u> <input type="checkbox"/> <u>MINI II</u> <input type="checkbox"/> <u>XL</u>		
儀器編號：		
檢體類別： <u>全血</u>		
違反品管規則： <u>超出品管可接受範圍時</u>		
試管批號_____開始使用日期_____		
_____開始使用日期_____		
品管液批號_____是否改變 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
此情形最近一週是否發生過 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
通知 <input type="checkbox"/> 品管負責人		
異常情況說明：		
發現人：_____填寫時間：_____		
處理過程及討論：		
發現人：_____填寫時間：_____		
改進措施：		
品管負責人：_____填寫時間：_____		
主管評語		
主管：_____填寫時間：_____		

Helena Actalyke 凝血時間測定儀能力評估表

人員姓名: _____ 職稱: _____

評估日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

操作觀察記錄表:

操作內容	未達標準	達到標準
1. 開機		
2 準備黑色翻蓋試管(C-ACT): □備好黑色翻蓋試管(直立即可)		
3 黑色翻蓋試管(C-ACT) 抽取 2CC 血液，並直接注入試管內，同時按下儀器的 Start 鍵		
4 黑色翻蓋試管(C-ACT): 蓋上試管蓋，在試管內左右搖動並輕彈試管底部，確定試管內底部的磁鐵沒有卡住，血液與藥劑混和均勻。		
5 將試管插入測試槽中，並將試管順時鐘旋轉後確定試管有讓儀器帶動跟著轉動		
6. 聽到機器聲響時，記錄顯示的數值。		
7 日保養 儀器清洗: 關閉電源開關並拔下電源線。用去離子水沾濕一塊不起毛的布料並擦拭儀器的表面		
8 週保養 使用 Actalyke 溫度計，置於探測井中，可接受範圍(36.5~37.5°C)。		

測試結果：合格不合格，再測試時間：_____

臨床指導教師：_____

